

## **ACTIMOVE SPORT CSUKLÓRÖGZÍTŐ GYEREK**

Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz.

Rendeltetés: Csukló sérülések esetén vagy rándulások, zúzódások megelőzésére.

Lejárat: lásd a csomagoláson.

Gyártó: BSN Medical GmbH, Németország, Quickbornstrasse 24 20253 Hamburg

Tárolás: szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.

Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Kedves Vásárló,

Köszönjük, hogy a levehető fém támasszal ellátott, bal és jobb kézen egyaránt használható Actimove csukló rögzítőt választotta.

### **Termék Leírás**

Az Actimove csukló rögzítő az anatómiai kialakítású támasszal, folyamatos terápiás kompresszió és egyenletes meleg hőérzet segítségével csuklófájdalom enyhítésére, illetve a gyógyulás elősegítésére alkalmazható. A kiváló neoprénmentes anyag miatt kényelmes és jó légáteresztő képességű.

### **Javallat**

A termék rendeltetése a csukló megfelelő helyzetben tartása.

Alkalmazási területek:

- ínhüvelygyulladások
- ficamok és rándulások
- lágyzöveti sérülések
- csont- és ízületgyulladások
- reumaszerű ízületgyulladások
- műtét utáni kezelések
- poszttraumás kezelések

Kérjük, forduljon orvosához, ha bizonytalan abban, hogy a termék megfelelő-e az Ön számára.

### **Ellenjavallatok:**

- Perifériás vénás ér-elzáródással járó betegségek (Phlebo-thrombosis, Thrombo-phlebitis)
- Perifériás artériás keringési zavarok
- Mikroorganizmusok okozta vénagyulladás (széptikus phlebitis)
- Nedvedző bőrbetegségek (dermatózisok)
- Nyílt sebek, a bőr folytonosságának megszakadásával járó bármilyen felszíni sérülés, fekély
- A végtagok idegkárosodása vagy idegpusztulása miatt előrehaladott perifériás neuropátia
- A termék anyagával szembeni intolerancia

### **Használati útmutató**

A termék otthoni használatra van kifejlesztve, vagy bizonyos esetekben sérülés megelőzés céljából, bizonyos tevékenységek közben (pl.: sporttevékenység). A használat ideje lehet egy óra (például sporttevékenység közben), de akár hosszú távú is, ha krónikus betegség miatt mindennapi használat javasolt. Az Actimove csukló rögzítő egyaránt használható a bal és a jobb kézen.

## Felhelyezés

Ha a bal csuklóhoz használja, a támaszt helyezze az alsó zsebbe, hogy a tenyér és a csukló helyzetét stabilizálja. (1. ábra)

Ha a jobb csuklóhoz használja, a támaszt helyezze a felső zsebbe, hogy a tenyér és a csukló helyzetét stabilizálja. (2. ábra)

### **Figyelmeztetés:**

- Az orvos által javasolt és megfelelően illeszkedő eszköz viselésekor általában nem tapasztalhatók mellékhatások.
- Érzészavarok, zsibbadás fennállása esetén előfordulhat, hogy a kompresszió miatt a nyomási helyeken vérellátási zavar alakult ki.
- Ilyen esetben mindig ellenőrizze a termék felhelyezésének pozícióját és a rögzítés erősségét.
- Az eszköz szakszerűtlen felhelyezése és rögzítése bőrelváltozásokat és az artériás vérellátás romlását okozhatja.
- A panaszok változatlan fennállása esetén azonnal forduljon kezelőorvosához.

### **Megjegyzés**

**Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló váratlan eseményt kérjük jelentsen a BSN medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Quickbornstrasse 24 20253 Hamburg) vagy az Essity Hungary Kft.-nek (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) vagy az illetékes helyi hatóságnak (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: [ogyei@ogyei.gov.hu](mailto:ogyei@ogyei.gov.hu), 1372 Postafiók 450).**

Lezárás dátuma: 2020. november 30.